



INAP QUICK GUIDE

Dele og tilbehør

Mundvandsbeholder

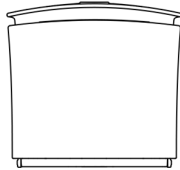


Mundstykke

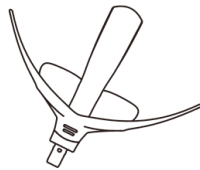

Konsol




Slangesæt

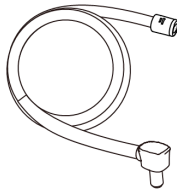


DryPad





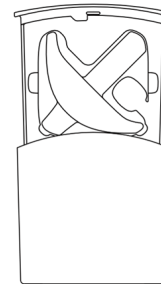



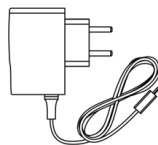





Boks til opbevaring af mundstykke (Skal købes separat)



Strømadapter




LED-indikatorer

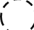 Batteri		Batteri lav
		Batteri fuld
		Opladning
		Opladning afsluttet
 Pumpe		Pumper til vacuum er opnået
		Fuld vacuum
 Mundvandsbeholder		Forkert påsat
		Korrekt påsat
		Mundvandsbeholder er fuld. Skal tømmes


VINGMED

INAP QUICK GUIDE

Opladning

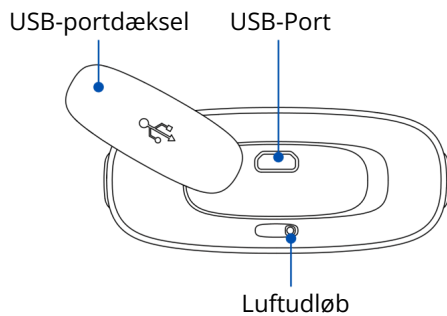


Åbn USB-portdækslet og sæt strømadapteren i en almindelig stikkontakt. (100-240Vac). Skal oplades ca. 8 timer ved første opladning. Derefter kun til LED-indikator viser fuld batteri.

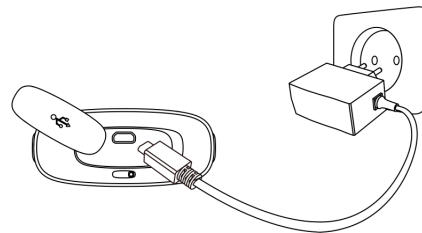


DryPad

Tryk på samme tid i begge sider for frigørelse af mundvandsbeholder

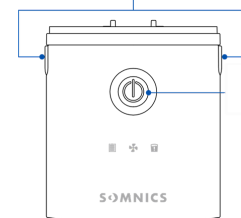


Tænd/Sluk

DryPad.

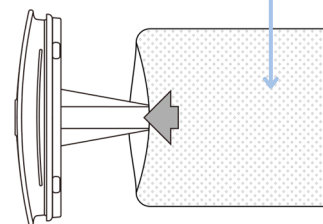


Riv toppen af DryPad ved perforeringen. Tryk let på siderne af DryPad, så der bliver en åbning. Midtrøret, på mundvandsbeholderens låg, placeres i den åbne DryPad.

Placer DryPads perforeringslinje under mundvandsbeholderens låg.

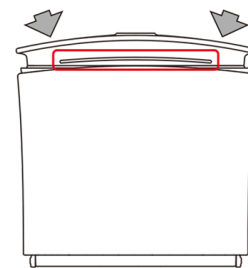

Sæt låget på mundvandsbeholderen og sørg for at der ikke er mellemrum mellem beholderlåg og beholder.


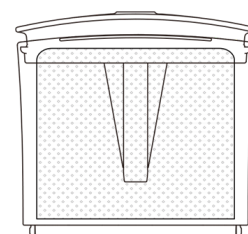


VINGMED


INAP QUICK GUIDE

Korrekt placering af mundstykke


Indsæt mundstykket i din mund ved at klemme læbeskjoldet korrekt.

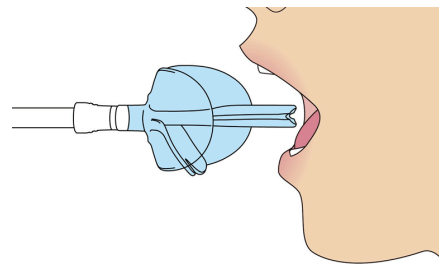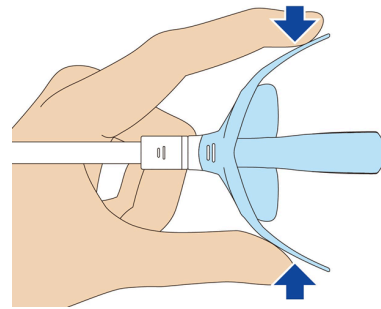

Sørg for at læbeskjoldet er placeret mellem forsiden af tænderne og indersiden af læberne

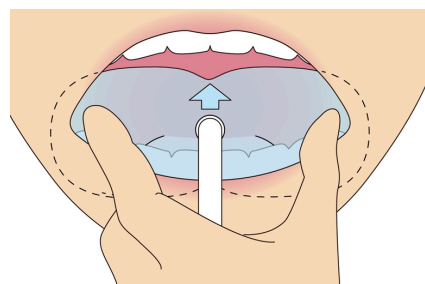

Luk munden og gør dig klar til at begynde behandlingen med iNAP. Placer tungen ovenpå tungeskjoldet og under tungespatlen.

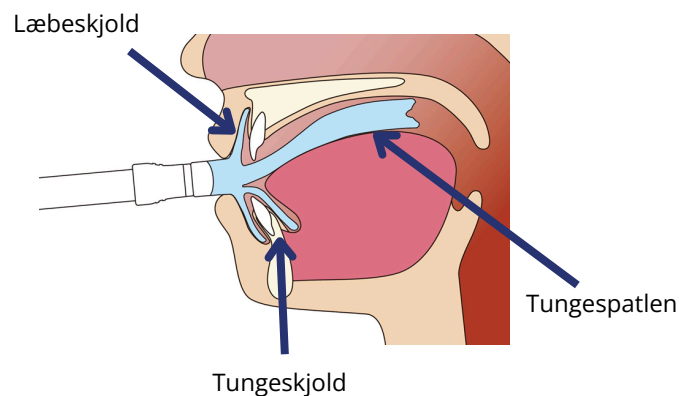

VINGMED


INAP QUICK GUIDE

Begynd behandlingen med iNAP

Tryk på tænd/sluk knappen på konsollen i mere 2 sekunder for at tænde enheden. De tre LED indikatorer vil blinke i et par sekunder under opvarmning, og derefter vil indikatoren for batteriets strømstatus blive vedvarende grøn, når systemet er fuldt tændt.




30 sekunder efter behandlingen er startet, vil lyset på batteri- og vakuuminikator blive dæmpet. Et kort tryk på tænd/sluk knappen kan ændre lyset tilbage til den oprindelige styrke.

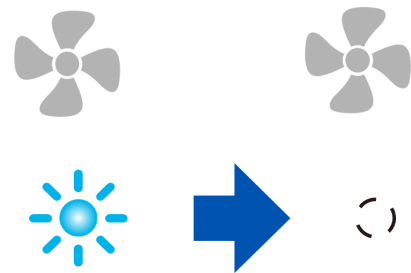


Rengøring efter brug

Tag mundstykket ud af munden og adskil slangen fra beholderlåget. Tag den brugte DryPad ud af beholderen og kasser den.

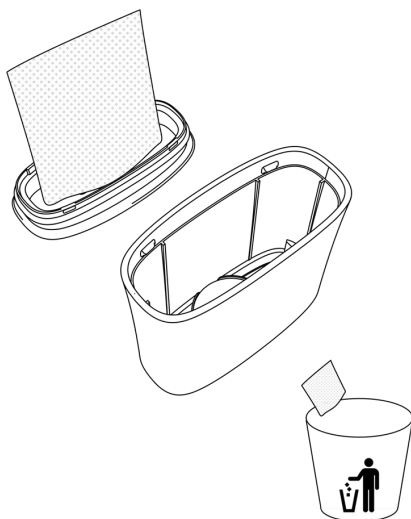


Frakobl mundstykket fra slangen. Rengør det brugte mundstykke i varmt vand.

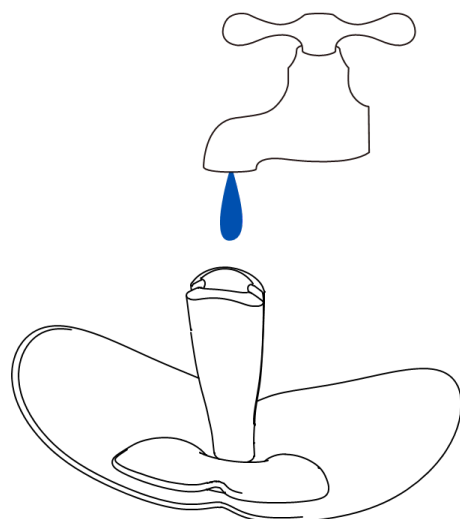


INAP QUICK GUIDE

Rengør den brugte slange.
Lad varmt vand løbe igennem slangen.

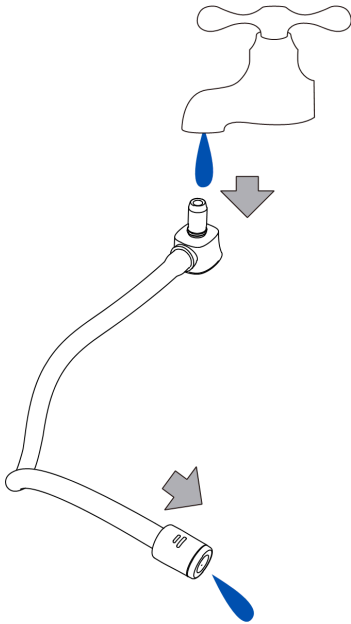

Tag låget af mundvandsbeholderen og rengør
låget i varmt vand.

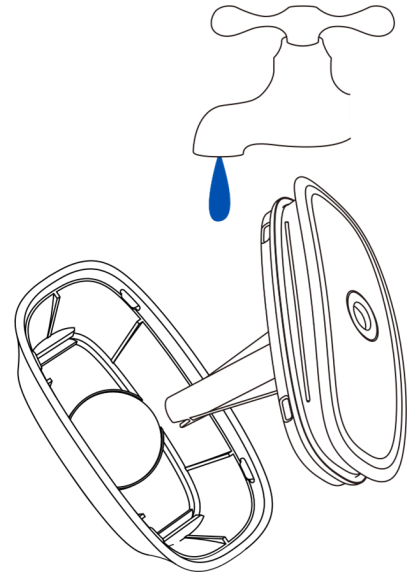

Boks til opbevaring af mundstykke og slange

Læg mundstykke og slange i opbevaringsboksen.
(Solgt separat)

