


# Tristel Duo™

# OPH


TIL GENANVENDELIGE  
TONOMETRE

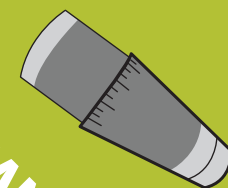

## Bemærk:

- Må ikke anvendes, hvis flasken er beskadiget.
- Desinficer hænderne og brug handsker ved håndtering af desinfektionsmidler og medicinsk udstyr.
- Fjern og kassér låsen, der forhindrer pumpen i at blive trykket ned.
- Hvis det er første gang Tristel Duo OPH skal bruges, skal der trykkes 2-4 gange på pumpen for at aktivere den.
- Følg hospitalets procedurer for rengøring, hvis overfladen er synligt snavset.
- Til professionel brug.

TRIN 1

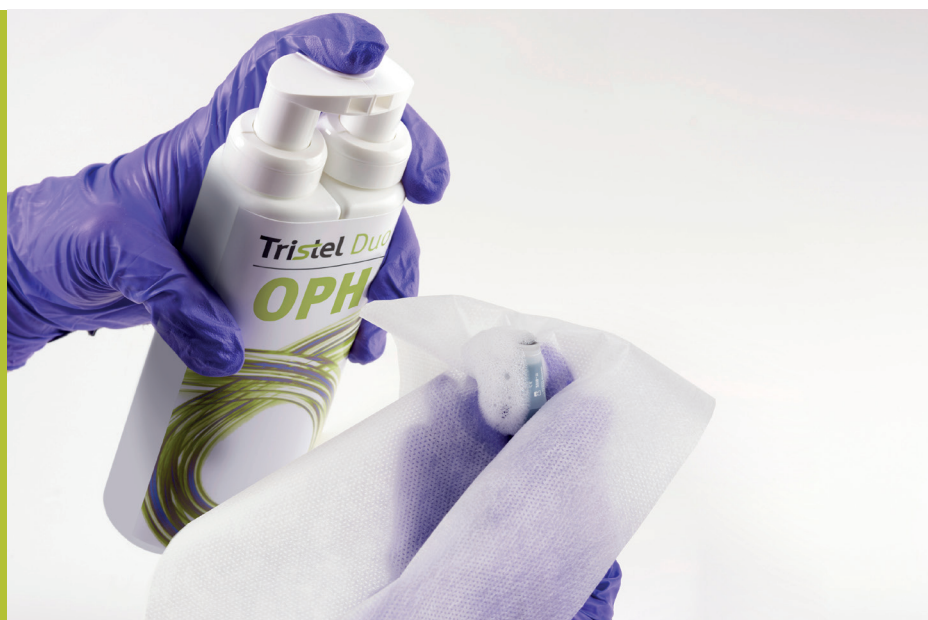

Tryk to gange på pumpen for at frigøre Tristel Duo på en serviet (Tristel Dry wipes anbefales) eller direkte på prismet.

TRIN 2



Brug servietten til at fordele skum over hele overfladen på prismet. Sørg for at alle områder er dækket med skum. Gentagende aftørring af overfladen er ikke nødvendig og bør undgås for at forhindre partikelafgivelse.

**Bemærk:** Bortskaf den brugte serviet i henhold til hospitalets retningslinier. Må ikke genbruges.

TRIN 3



Lad det tørre i minimum **30 sekunder**.

TRIN 4



Skyl prismet med vand af en passende kvalitet.

**Bemærk:** Opbevar det medicinske udstyr i overensstemmelse med hospitalets retningslinier for at undgå skader eller rekontaminering.

**Tristel™**

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

For mere information om Tristels patent, besøg: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions  
Mkt-Wal-390-1  
January 2018