


Tristel Trio™

Wipes System


En samlet løsning for en højniveau-desinfektion til varmfølsomt medicinsk udstyr uden luminae.

 Se brugervejledning for at få en mere detaljerede instruktion.

Bemærk:

- Følg altid hospitalets retningslinier og producentens instruktioner.
- Desinficer hænderne og brug handsker ved håndtering af desinfektionsmidler og medicinsk udstyr.
- Følg hospitalets retningslinier for tidlig rengøring af instrumentet efter endt brug.
- Pas på ikke at gnutte eller bøje instrumentet og vær ekstra opmærksom ved hjørner, forhøjninger og fordybninger.
- Forbered dekontaminering ved at tage en af hver serviet og activator-skum fra kassen.
- Benyt ikke produktet, hvis pakken er beskadiget eller servietten er udtørret.
- Fjern hylster/kondomet og ultralydsgel fra proben med en papirserviet og bortskaf dette i henhold til hospitalets retningslinier.
- Benyt flere servietter, hvis det er nødvendigt, for at sikre at instrumentet er synligt rent.
- Behold indpakning fra servietterne til senere færdiggørelse af sporbarheden efter endt desinfektion.
- Bortskaf servietter og handsker i henhold til hospitalets retningslinier.
- Til professionel brug.

TIL KAVITETS
ULTRALYDSPROBER

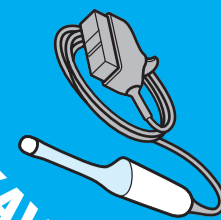

TRIN 1: RENGØRING



Pak pre-clean servietten ud og placer den i håndfladen.

Tør ultralydsproben af for at fjerne synligt snavs.

Bortskaf den brugte serviet og handsker i henhold til hospitalets retningslinier.

Desinficer hænderne og tag nye handsker på.

TRIN 2a + 2b: AKTIVERING



Pak sporicidal-servietten ud og placer den i håndfladen.

Tag activator-skumflasken og tryk to doser skum ud på servietten.

Fold servietten og krøl den sammen i **15 sekunder** for at skabe klordioxid.

Sørg for servietten er fuldstændig dækket af skum.



TRIN 2: HØJNIVEAU-DESINFEKTION



Tør overfladen af ultralydsproben i én bevægelse for at fordele skummet. Sørg for at alle områder er i kontakt med servietten.

Hvis det er nødvendigt, benyt en vatpind for at fordele skummet i fordybninger.

Bortskaf servietten i henhold til hospitalets retningslinier.

Lad tørre i minimum **30 sekunder**.



TRIN 3: RENS



Pak rinse-servietten ud og fold den i håndfladen.

Tør ultralydsproben af for at fjerne overskydende skum.

Bortskaf den brugte serviet i henhold til hospitalets retningslinier.

TRIN 4: SPORBARHED



Efter færdiggørelse af desinfektionen, tilføj tallene fra serviettens indpakning og activator-skumflasken i Tristel Quality Audit Trail Record Book for fuld sporbarhed.