


Brugervejledning Rocket IPC flaskeadapter

(Samme brugervejledning som til Rocket IPC drænpose)

Har drænkatetret en ventil, der ligner den, der vises på billede A, skal der bruges en adapter til at tilslutte Rocket flasken til kateterventilen.

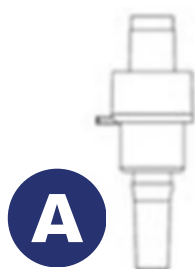

1

Valve cap



Adapter



Rocket vakuumflaske, (samt pose og Drainage Line) indeholder en ventilhætte og en adapter.

2

Drainage line



Adapter

Access tip



Fjern beskyttelsen fra adgangsspidsen.

3



Sæt adapteren ind over adgangsspidsen med de 4 tapper vendt mod adgangsspidsen.

4



Drej forsigtigt...

5



...indtil adgangsspids og ventil klikker sammen og er låst.

6



Fjern ventilhætten fra drænet og rengør omkring ydersiden af kateterventilen med en spritserviet. Tag flaskens adgangsspids og sæt ind i ventilen. Der føles en smule modstand, hvilket er normalt. Drej adgangsspidsen til låst tilstand.

7



Dræn væsken ved at følge Rocket brugervejledning.

8



Når drænen er afsluttet, drejes adgangsspidsen til ulåst tilstand og fjernes forsigtigt fra katetret. Rengør omkring ventilåbningen med en spritserviet.

9



Påsæt en ny ventilhætte.

10



Afsluttes med en ren forbindelse.