

DreamLine, behandlingsstolen med én stor overflade -oplev mere fleksibilitet og komfort



Tilbehør for individuelle ønsker



Det bevægelige, aftagelige og robuste armlæn er lavet i PU skum. Justeres nemt for optimal støtte af patientens arm.



4 sengeheste kan hurtigt og nemt monteres for at øge sikkerheden.



Sengegalge giver øget fleksibilitet og handlemfrihed til patienten.



Der er mulighed for at montere et dropstativ ved stolens hovedende.



LED lampen giver et behageligt lys, så patienten har mulighed for at læse eller arbejde under behandlingen.



Hovedgærde og fodstøtte er tilgængelig i ovenstående farver, andre ved forespørgsel. Madrassen kommer kun i hvid.

Teknisk data:

Dimensioner

Bredde ekskl. armlæn	90 cm
Total længde	230 cm
Madrassbredde	75 cm
Madraslængde	215 cm
Total vægt	123 kg

Elektriske specifikationer

Beskyttelsesklasse	2
Beskyttelseskategori	IPX 4
Godkendt efter standard	EN 60601
Antal motorer	5

Justeringer

Rygområdet vinkel	0° – 75°
Sædeområdet vinkel	0° – 25°
Benområdet vinkel	0° – 25°
Fodstøtte	23 cm
Højdejustering, inkl. madras	55 – 95 cm

Sikkerhed

Maksimal belastning	250 kg
Vinkel ved Trendelenburg	- 12°
Tid for Trendelenburg position	15 sec

VINGMED | ViCARE

Distributør:
Vingmed | ViCare A/S
Birkerød Kongevej 150B
DK-3460 Birkerød
Tlf: (+45) 45 82 33 66
Mobil: (+45) 51 99 14 24
E-mail: ht@vingmed.dk
www.vingmed.dk

Right for technical modifications reserved
B-WOBDL/DK/01 2020-04


Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

bionic
www.therapychair.com


DreamLine -tilbyder din patient forskellige siddepositioner, samt en meget afslappende tilbagelænet position



Den lave højde giver patienten nem adgang, -også fra en kørestol.

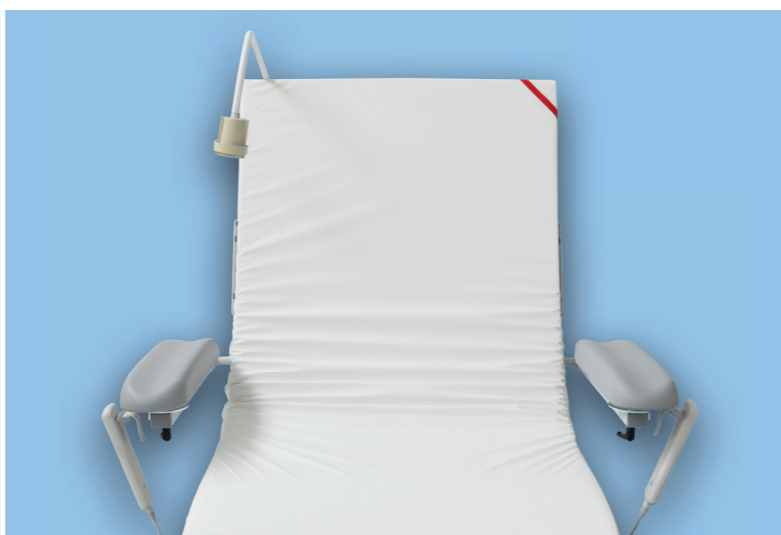

Under behandlingen kan patienten tilpasse stolen for at opnå den bedste, mest behagelige og komfortable position med fjernbetjening på begge sider – højre og venstre side.

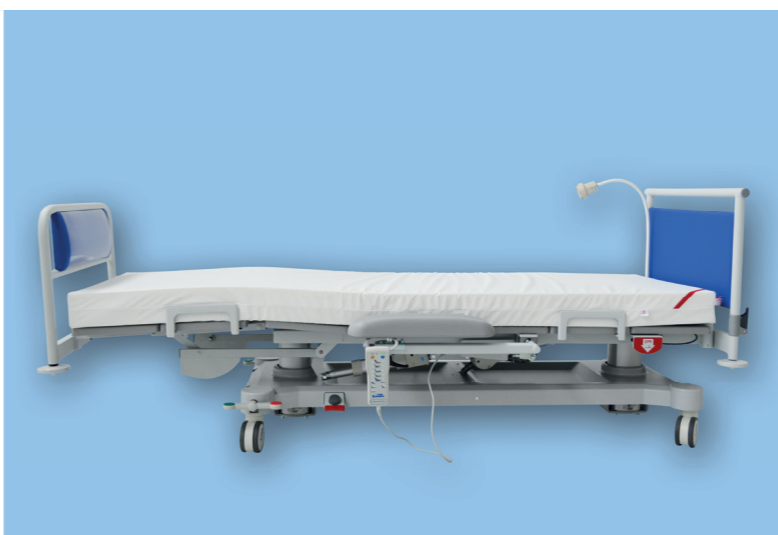

DreamLine kan justeres til komplet horisontal position for optimal afslapning.



Trendelenburg aktiveres ved fodpedal, så sundhedspersonalet har hænderne fri.

DreamLine har forbedret fordelene ved en behandlingsstol ved at tilføje én stor overflade, med mere fleksibilitet i funktionerne. Udover din patients behov for en behagelig siddestilling, så giver stolen også mulighed for en behagelig liggende position.

5 lydsvage motorer sikrer en jævn og kontinuerlig justering til enhver ønsket siddende eller liggende stilling, styret nemt med fjernbetjeningen. Højden kan justeres elektrisk mellem 55 og 95 cm. Og for en endnu mere behagelig stilling, afhængig af patientens højde, så er der en elektrisk justerbar fodstøtte.

På grund af den stabile ramme, så er DreamLine meget sikker i alle positioner. Den elektriske EN60601 standard tilføjer yderligere sikkerhed for din patient.

Under madrassen, som er nem at fjerne, ligger en plastikbund. Denne er nem at rengøre, samt modstandsdygtig overfor desinfektionsmidler. Plastikbunden og madrassen er tilsammen med til at give den unikke DreamLine sidde -og liggeposition.

Sengens nederste ramme har god plads til patientens ejendele.


I akutte situationer kan stolens ryg sænkes manuelt med håndtag og Trendelenburg position aktiveres hurtigt og nemt ved hjælp af fodpedal.

Yderligere kan hovedgærdet hurtigt og nemt fjernes for at sikre fuld adgang til patientens hoved.

Tilbehør for individuelle ønsker, herunder armlæn, dropstativ og sengegalge, forøger funktionaliteten og fleksibiliteten ved denne DreamLine behandlingsstol. Stolen kan desuden justeres for at spare plads. Hvis din patient ønsker at læse eller arbejde under behandlingen, så giver LED lampen et behageligt lys. Og for mere sikkerhed, så kan der nem mulighed for at montere op til 4 sengeheste.



Fjernbetjeningen giver mulighed for en simpel og nem justering, både ved forud programmerede positioner, og ved individuelle ønsker.

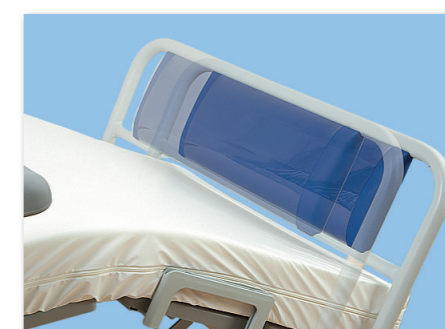

Med den justerbare elektriske fodstøtte, så kan DreamLine tilpasses din patients højde. Fodstøtten kan let fjernes, hvis den er uønsket.



Under madrassen ligger en plastbund, der er nem at rengøre, samt sikrer en stabil, sikker og hygiejnisk overflade.



Fodpedalen til Trendelenburg og den farvekodede bremse er placeret på stolens ramme.



Hovedgærdet kan hurtigt og nemt fjernes for at sikre fuld adgang til patientens hoved.



I akutte situationer kan stolens ryg sænkes manuelt med håndtag for øget sikkerhed, findes håndtag, på både højre og venstre side.