


# BRUGERVEJLEDNING TIL PNEUMOTHORAX DRÆNPOSE

KONTROL: Anvend ikke Pneumothorax drænposen hvis emballagen er åben eller beskadiget, eller hvis posen er beskadiget.

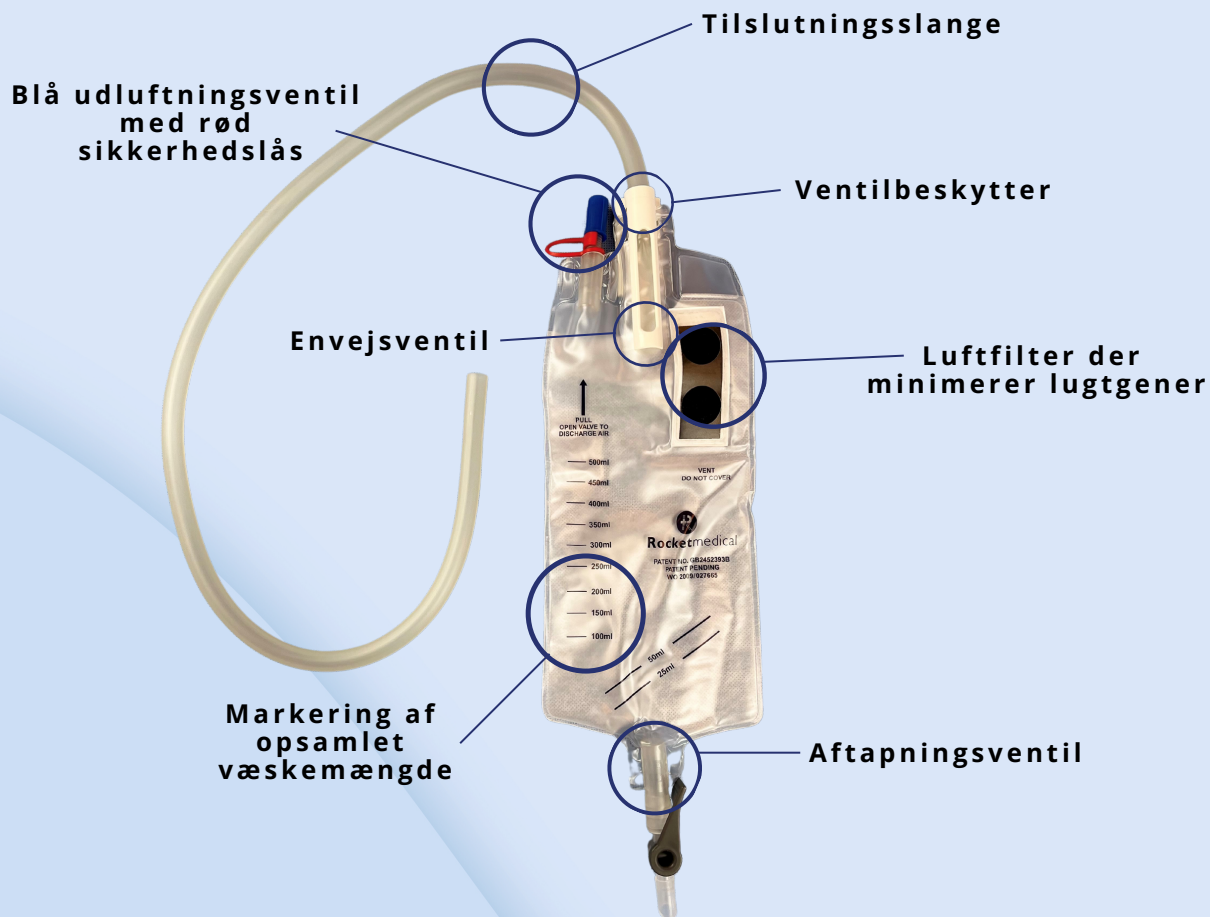

## KLARGØRING FØR BRUG:

- 1 Brug den medfølgende sprøjte på 60 ml til at sikre at posens (usynlige) envejsventil fungerer korrekt. Sprøjten trækkes tilbage til mindst 50 ml. Sæt sprøjtes spids til posens tilslutningsslange og injicer luften. Luften ledes dermed gennem den (usynlige) envejsventil ind i posen, og en svag hævelse af posen kan ses.

**OBS: Pres ikke sprøjten hårdt ind i tilslutningsslangen, da den så vanskeligt kan trækkes ud igen.**

- 2 Den blå udluftningsventil skal være åben, og den røde sikkerhedslås skal placeres under den blå ventil under brug for at sikre udluftning.
- 3 Hvis væske er i kontakt med udluftningsventilen, kan der lækkes væske.
- 4 For at tilslutte pneumothorax drænposen til drænet, skal der bruges en Drainage Line og en konnektør som mellemstykke (se billede D).
- 5 Kun kvalificeret personale, der er bekendt med pleje af pleuradræn, bør administrere drænposen.

## BRUG:

- 6 Efter kontrol af envejsventilens funktion skal Pneumothorax drænsættet samles.
- 7 Den slanke ende af den medfølgende konnekter fra Drainage Line sættes på posens tilslutningsslange (Se billede A).
- 8 **Klemmen på Drainage Line lukkes (Se billede B).**
- 9 Drainage Lines luer-lock kobles til konnekter (Se billede B).
- 10 Den blå udluftningsventil øverst på posen åbnes med et kvart vrid og en trækbevægelse. Placer den røde låseanordning under den blå ventil for at forhindre, at ventilen lukkes ved et uheld.  
Når den røde låseanordning er placeret under den blå udluftningsventil, angiver det, at udluftningsventilen er åben.
- 11 Sørg for at det hvide fugtabsorberende materiale er placeret mod kroppen, så de to luftfiltre vender udad. Undgå liggende stilling, da væsken så kan dække udluftningsventilens åbningen. Dette vil forhindre udluftning gennem ventilen, og der kan lækkes væske. Brug den medfølgende sengeholder til posen, hvis der ønskes liggende stilling.
- 12 Drainage Line tilsluttes drænet (Se billede C).
- 13 **Åbn klemmen på Drainage Line** og dræningen begynder.
- 14 Monter og juster bæltet ved at løsne velcroen og føre det gennem bæltestropperne på den hvide ventilbeskytter. Placer den derefter, så posen sidder behageligt. Alternativt kan bæltet anvendes som en skulderrem. Eller den hvide ventilbeskytter kan placeres direkte i bukselinningen.
- 15 Posen kan tømmes ved hjælp af aftapningsventilen i bunden af posen, men husk at lukke den efter brug.
- 16 **Når posen frakobles eller skiftes, skal klemmen på Drainage Line være lukket.**

