

# Rocket<sup>®</sup> IPC<sup>™</sup> Drænagekit

## BRUGERVEJLEDNING - FORBEREDELSE & DRÆNAGE

**1**

Åbn pakningen og fold den blå indpakning ud på et rent bord. Placer flasken tæt ved det blå stykke indpakning, og placer flaskens adgangsspids på den blå indpakning.

**2**

Klar til brug

Må ikke bruges

Undersøg flaskens indikator. Hvis den er udfoldet, tages en ny flaske.

**3**

Tag de sterile handsker på. Rør kun ved handskerne håndled.

**4**

a. Tag ventilhætten ud af pakningen.  
b. Åbn de 4 spritservietpakninger  
c. Tag den gennemsigtige forbindelse ud af pakken. Placer alle dele midt på den blå indpakning.

**5**

Fjern beskyttelsesstykket fra adgangsspidsen, og læg adgangsspidsen på den blå indpakning.

**6**

Tag ventilhætten af katetret.

**7**

Rengør med den 1. spritserviet omkring ventilåbningen.

**8**

Indsæt forsigtigt adgangsspidsen ind i ventilen og drej for at låse.

**9**

Skub den hvide klemme til åben position.

**10**

Tryk på knappen for at begynde drænage.

**11**

Når drængen er afsluttet, drejes adgangsspidsen til ulåst tilstand og fjernes forsigtigt fra katetret.

**12**

Rengør omkring ventilåbningen med den 2. spritserviet.

**13**

Påsæt en ny ventilhætte.

**14**

Rengør huden omkring katetret med den 3. spritserviet.

**15**

Placer skumpatchen omkring katetret og rul katetret pænt sammen ovenpå patchen.

**16**

Dæk katetret med gazepatchen og placer den selvklæbende forbindelse ovenpå.

**17**

Forbindingen er anlagt korrekt.

# VINGMED