

SKYLLEINSTRUKTION

til skylning af Rocket katetersystem eller *udtagning af steril væskeprøve*

Anvend ikke Rocket Drainage Line (R54410-00-DL) hvis emballagen er åben eller beskadiget.



Anvendes sammen med Rocket Skiftesæt (R54400-00-00)

KLARGØRING FØR BRUG:

- Brug et rent og ryddeligt arbejdsbord.
- Vask hænderne grundigt og klargør Drainage Line og Skiftesæt.
- Ved skylning af drænet, skal der desuden anvendes 10 ml sprøjte og sterilt saltvand.
- Sprøjten fyldes før tilkobling til Drainage Line.
- Ved *udtagning af steril væskeprøve* tilsluttes en tom steril sprøjte.

SKYLNING PÅ DRÆNET ELLER UDTAGNING AF STERIL VÆSKEPRØVE:

- 1 Luk klemmen på Drainage Line.
- 2 Skylning: Sprøjten fyldes med sterilt saltvand, evt. anvendes præfyldt sprøjte.
Steril væskeprøve: Anvend tom sprøjte
Sprøjten sluttes til luer låsen på Drainage Line
- 3 Tag ventilhætten af katetret ved at dreje mod uret og træk forsigtigt. Ventilhætten kasseres.
- 4 Rengør omkring ventilåbningen med en spritserviet fra Skiftesæt. Tag sterile handsker på.
- 5 Plasticbeskyttelsen fra adgangsspidsen på Drainage Line fjernes. Adgangsspidsen fra Drainage Line holdes steril og indsættes forsigtigt i kateterventilen. Drej for at låse.
- 6 Klemmen åbnes, og der skylles eller *udtages væskeprøve*.
- 7 Brug ikke mindre end 10 ml til skylning af katetret. Hvis katetret ikke kan skylles eller aspireres, kan det delvist eller helt være tilstoppet. Skyl ikke mod modstand.
Steril væskeprøve: Træk sprøjtestemplet tilbage for at trække en steril væskeprøve.
- 8 **Vigtigt: Klemmen på Drainage Line SKAL være lukket, hvis sprøjten fjernes fra Drainage Line før frakobling fra katetret.**
- 9 Efter skyl eller *væskeudtagning* drejes adgangsspidsen til ulåst tilstand og Drainage Line fjernes forsigtigt fra katetret.
- 10 Rengør omkring ventilåbningen med en ny spritserviet og påsæt en ny ventilhætte.
- 11 Ny forbindelse påsættes som vist i Brugervejledning – Forberedelse & Drænage punkt 15-17.