

## Brugsanvisning – Silverin Sticks/sølvnitratpinde

Sølvnitratpinde må kun anvendes af autoriseret sundhedspersonale, og på det område, som skal behandles. Sølvnitratpinde er beregnet til engangsbrug.

Spidsen af pinden skal fugtes med vand inden behandling. Det er ikke nødvendigt at fugte det område, som skal behandles, hvis det allerede er fugtigt inden behandlingsstart.

Hensigten er at overføre spidsen rigt med sølvnitrat til det område, som skal behandles.

Området skal behandles ved dupning og rulning af spidsen gentagne gange, uden at gnide eller presse pinden.

Det behandlede område misfarves, og huden fjernes fra det omgivne væv et par dage efter. Der kan gå op til 24 timer inden området skifter farve.

Behandlingen gentages efter 2-3 dage indtil det ønskede resultat er opnået.

### Ved behandling af Granulationsvæv

- Desinficér tåen, og rens tåen bedst muligt
- I tilfælde af, at bøjlen ikke kan påsættes grundet granulationsvæv, kan sølvnitrat være behjælpelige med fjerne granulationsvævet
- Fugt neglevolden, hvis granulationsvævet er tørt
- Touchér med sølvnitratpinden
- Læg sterilt gaze forsigtigt ned i neglesiden, så du trækker neglevolden væk fra neglen. Derved opstår der en lomme
- Påsæt plaster på det behandlede område

### Ved behandling af vorter

- Beskær vorte
- Fugt og touchér vorten med sølvnitratpinden
- Påsæt plaster på vorten – Sølvnitrat vil ætse vorten, samtidig med at beskytte mod smitte
- Kald patienten ind henholdsvis 1-4 uger efter behandling
- Beskær, retoucher med sølvnitrat, og påsæt plaster
- I tilfælde af, at vorten sidder på et trykudsat område, er det vigtigt, at aflaste området med indlæg eller filt
- Gentag behandlingen indtil vorten er forsvundet